
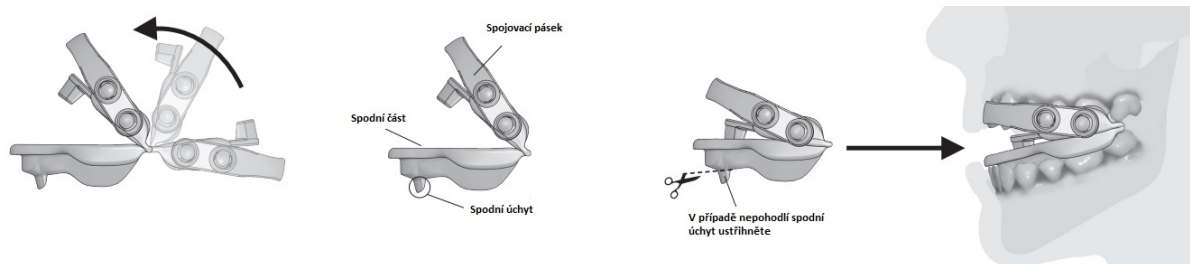


Somnolis – pomůcka proti chrápání – příbalový leták

Princip a fungování pomůcky Somnolis

Somnolis zajišťuje posunutí spodní čelisti o několik milimetrů dopředu, čímž uvolňuje zadní část jazyka, a tak uvolňuje větší prostor pro dýchání. Tímto redukuje nebo úplně eliminuje chrápání a přináší mnohem kvalitnější spánek.

Před spaním přichyťte pomůcku v ústech.

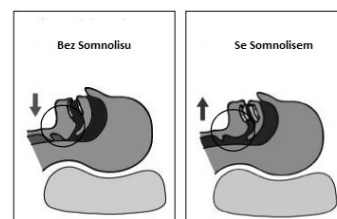

Součástí balení jsou 4 spojovací pásky očíslované (0,2,4,6) dle velikosti. Číslo reprezentuje milimetry o kolik bude čelist posunuta oproti normálu. Doporučujeme začínat na velikosti 2 a v případě potřeby (neefektivnosti) použít pásek s vyšším číslem. Případně v případě bolesti, nepohodlí ubrat na nižší velikost. Použití pomůcky Somnolis je závislé na rozložení zubů v ústech, je nutné vyzkoušet pásky a najít si ten správný. Kvůli rozdílnému rozložení zubů je možné, že produkt nebude pro někoho použitelný.

Indikace – na co se pomůcka Somnolis používá:

- Chrápání
- Apnoe – v některých případech (cestování), nutné konzultovat použití s lékařem

Kontra-indikace – kdy pomůcku nepoužívat:

- Pokud nosíte nasazovací zubní protézu
- Pokud se u vás objevila bolest čelisti, trpíte nestabilitou zubů nebo máte v horní nebo dolní čelisti méně než 10 zubů

Možné vedlejší efekty:

- citlivost zubů,
- bolest uší, která zmizí obvykle během pár dní používání produktu (nebo se zhorší – v tomto případě použijte slabší spojovací pásek, případně konzultujte se svým lékařem),
- nadměrné slinění, které se zredukuje po pár dnech používání,
- suchost v ústech, dávivý reflex (velmi vzácně),
- změny v držení čelisti – pokud po sundání pomůcky čelist nejde přirozeně zpět na své místo, přestaňte výrobek používat,

- pokud nastanou jakékoli jiné negativní vedlejší účinky, přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého lékaře, případně výrobce produktu.

Údržba, životnost a garance pomůcky

Každé ráno po použití vyjměte pomůcku z úst a vyčistěte ji zubním kartáčkem, poté ji vložte do speciálního pouzdra, které můžete naplnit vlažnou vodou a antibakteriálním přípravkem pro čištění zubních protéz. Před použitím pomůcku vždy opláchněte čerstvou vodou. Životnost produktu závisí na frekvenci používání, kyselosti v ústech a tlakem zubů. Záruka zařízení je platná pouze na výrobní vady (ne na vady vzniklé používáním nebo špatným používáním).

Každý den zkontrolujte, zdali je pomůcka v pořádku. V případě prasklin, natržení nebo poškození přestaňte pomůcku používat a je nutné ji vyměnit za novou. Efektivita funkčnost pomůcky závisí na anatomii čelisti uživatele. Při použití proti spánkové apnoe doporučujeme konzultaci s lékařem.

Pro více informací, případné další dotazy kontaktujte výrobce: info@oscimedsa.com / www.oscimedsa.com

Dovozce a distributor pro ČR: Earplugs s.r.o., Havlíčkova 1016, 53002 Pardubice, Czechia, www.earplugs.cz, (+420) 731 389 483, earplugs@earplugs.cz